

SORBACT® ROUND SWAB

Infektionsforebyggende gazevisker



REDUCERER DEN MIKROBIOLOGISKE BELASTNING I SMÅ KAVITETSSÅR

Sorbact® Round Swab er en steril sårbandage, der binder bakterier og svampe. Den består af et grønt Sorbact® sårkontaktlag, der er formet til en kugle og holdes sammen af en silikonering.

Produkt	Varenr.	Størrelse	Stk. / æske
Sorbact® Round Swab	98126	diameter 3 cm	70 (5 x 14)



TILSIGTET ANVENDELSE


Sorbact® Round Swab er velegnet til sårrensning eller som sårfyldningsmateriale i behandlingen af rene, koloniserede, kontaminerede eller inficerede væskende sår, såsom mindre kavitetssår.

BRUGSANVISNING - SÅRRENSNING

1. Fjern bandagen fra posen ved steril teknik.
2. Fugt Sorbact® Round Swab i vandopløsningen, pres overskydende væske ud.
3. Rens forsigtigt såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis.

BRUGSANVISNING - SÅR

1. Forbered såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis.
2. Fjern bandagen fra posen ved steril teknik.
3. Ved kavitetssår skal bandagen lægges direkte på såret, så der sikres kontakt med hele såroverfladen.
4. Anvend en passende sekundærbandage.
5. Bandagens skiftetofrekvens afhænger af sårets ekssudatniveau samt sårets og den omgivende huds generelle tilstand. Bandagen kan sidde i op til 7 dage, hvis den kliniske tilstand tillader det.

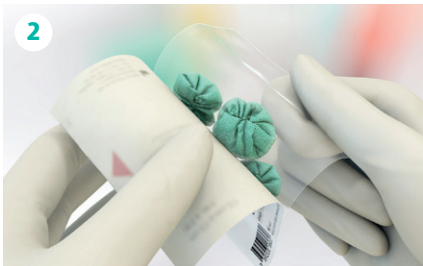

SORBACT® – FOREBYGGER INFEKTION

Sorbact® bakteriebindende bandage forebygger og behandler sårinfektioner ved at reducere den mikrobiologiske belastning i såret på naturlig vis. Mikroorganismene bindes irreversibelt til bandagens overflade og fjernes, når bandagen skiftes.