


SORBACT® SURGICAL DRESSING

Infektionsforebyggende kirurgisk bandage med klæber

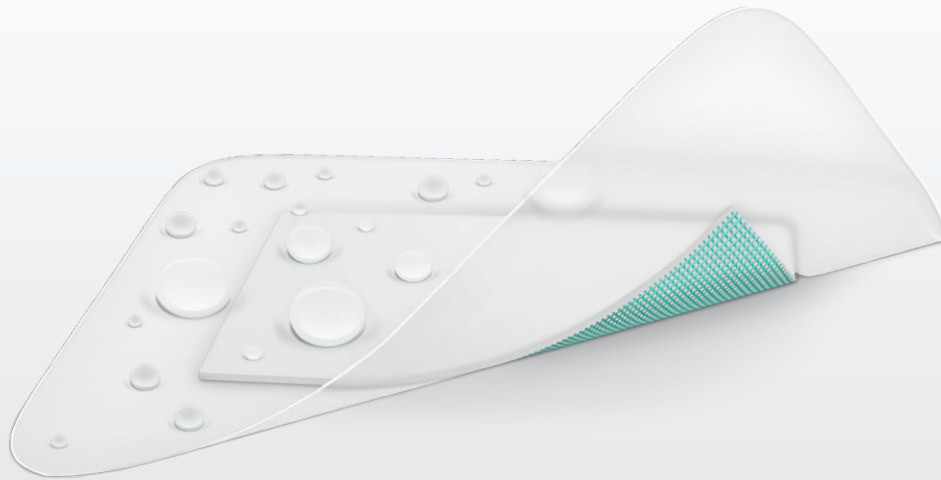

REDUCERER SIGNIFIKANT RISIKOEN FOR POSTOPERATIVE INFEKTIONER¹

Sorbact® Surgical Dressing er en steril sårbandage, der binder bakterier og svampe. Den består af et grønt Sorbact® sårkontaktlag kombineret med en absorberende sårpude og en transparent, semipermeabel, klæbende film. Sorbact® Surgical Dressing absorberer og holder på ekssudat og opretholder et fugtigt sårmiljø. Den vandafvisende film beskytter mod ekstern kontaminering og lader overskydende væske fordampe.

Produkt	Varenr.	Størrelse	Str. sårpude	Stk. / æske
Sorbact® Surgical Dressing	98140	5x7,2 cm	2,8x3,8 cm	100
Sorbact® Surgical Dressing	98141	8x10 cm	4x5 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98142	8x15 cm	3,8x10 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98143	10x20 cm	5x15 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98144	10x25 cm	5x20 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98145	10x30 cm	5x25 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98146	10x35 cm	5x30 cm	20



TILSIGTET ANVENDELSE


Sorbact® Surgical Dressing er beregnet til brug i behandlingen af rene, koloniserede, kontaminerede eller inficerede sår, der er tørre eller med lavt ekssudatniveau, såsom operationssår og traumesår, f.eks. rifter, snitsår og hudafskrabninger.



BRUGSANVISNING

1. Forbered såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis. Kontrollér at huden omkring såret er ren og tør.
2. Vælg en passende bandagestørrelse til såret.
3. Fjern bandagen fra posen ved steril teknik.
4. Fjern beskyttelsesfilmen fra bandagens sårkontaktside.
5. Læg bandagen på. Sørg for at den grønne side af sårkontaktlaget er i direkte kontakt med hele såret.
6. Tryk kanterne fast på den omgivende hud.
7. Fjern den øverste stabiliserende film. Begynd ved den blå markør.

Bandagen kan sidde i op til 7 dage, hvis den kliniske tilstand tillader det.

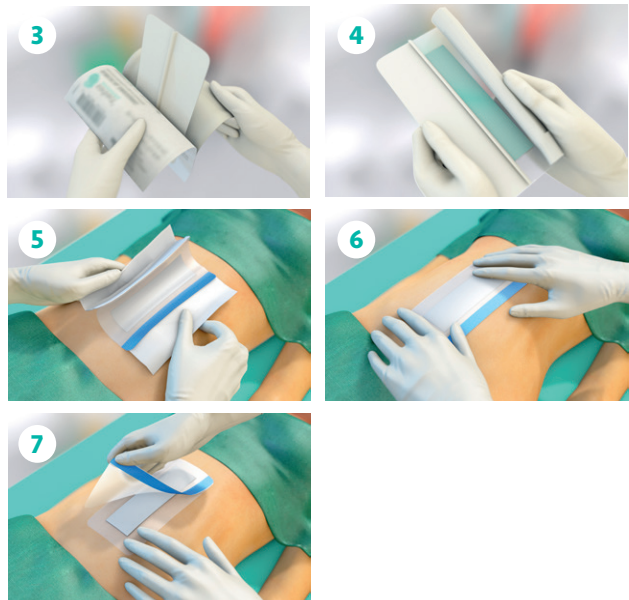

Reference: 1. Stanirowski PJ, Bizon M, et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbonyl Chloride (DACC) Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. *Hosp Infect Epidemiol* 2016; [in press].



SORBACT® – FOREBYGGER INFEKTION

Sorbact® bakteriebindende bandage forebygger og behandler sårinfektioner ved at reducere den mikrobiologiske belastning i såret på naturlig vis. Mikroorganismene bindes irreversibelt til bandagens overflade og fjernes, når bandagen skiftes.