


# SORBACT® FOAM GENTLE BORDER

Infektionsforebyggende skumbandage med blød silikonekant

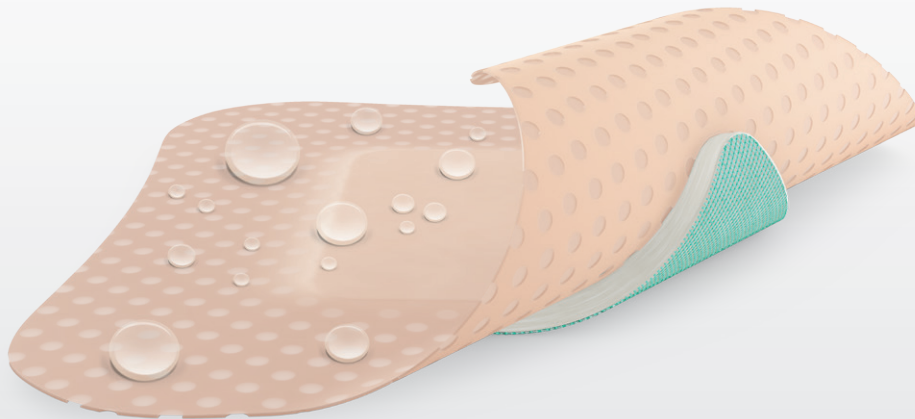

## DEN ATRAUMATISKE ALT-I-EN BANDAGE DER REDUCERER DEN MIKROBIOLOGISKE BELASTNING


Sorbact® Foam Gentle Border er en steril, selvklæbende, absorberende sårbandage, der binder bakterier og svampe. Den består af et grønt Sorbact®-sårkontaktlag kombineret med polyurethanskum, bløde, klæbende silikonekanter og en semipermeabel film af polyurethan. Sorbact® Foam Gentle Border er velegnet til mange forskellige typer af sår.

Produkt	Varenr.	Størrelse	Str. sårpude	Stk. / æske
Sorbact® Foam Gentle Border	98531	7,5x7,5 cm	3,5x3,5 cm	10
Sorbact® Foam Gentle Border	98532	10x10 cm	5x5 cm	10
Sorbact® Foam Gentle Border	98533	15x15 cm	10,5x10,5 cm	10



## TILSIGTET ANVENDELSE

Sorbact® Foam Gentle Border er velegnet til brug i behandlingen af rene, koloniserede, forurenede eller inficerede sår, der er moderat væskende, såsom postoperative sår, traumesår, tryksår, diabetiske sår samt ben- og fodsår.

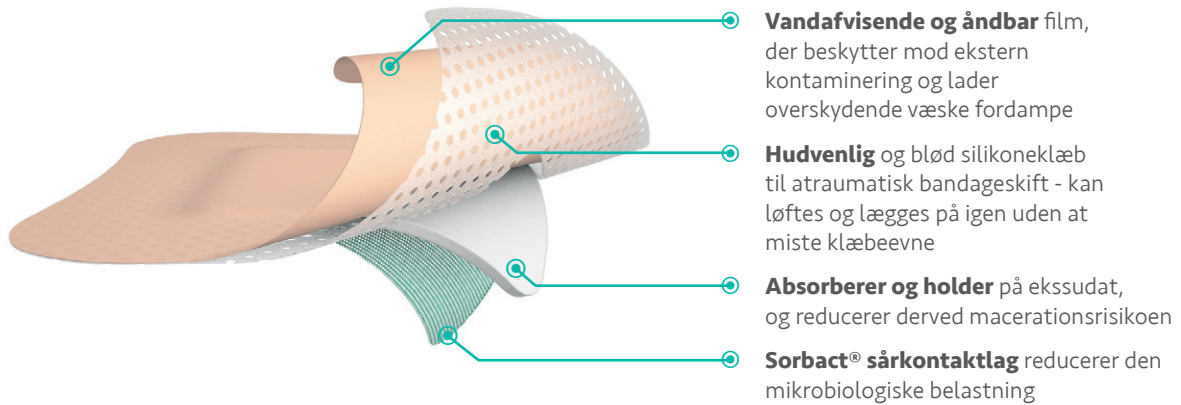

## BRUGSANVISNING

1. Behandl såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis. Kontrollér, at huden omkring såret er ren og tør.
  2. Vælg en passende bandagestørrelse til såret. Sårpuden skal overlappe sårets kanter med 1 cm for at minimere risikoen for maceration.
  3. Fjern bandagen fra posen ved steril teknik.
  4. Fjern beskyttelsesfilmen fra bandagens sårkontaktside.
  5. Læg bandagen på. Bandagen må ikke strækkes. Sørg for, at den grønne side af sårkontaktlaget er i direkte kontakt med hele sårets overflade.
  6. Pres let kanterne mod huden omkring såret. Om nødvendigt kan bandagen justeres og lægges på igen.
  7. Bandagens skiftefrekvens afhænger af sårets eksudatniveau og den generelle tilstand i og omkring såret.
- Bandagen kan anvendes i kompressionsterapi.



## SORBACT® – FOREBYGGER INFEKTION

Sorbact® bakteriebindende bandage forebygger og behandler sårinfektioner ved at reducere den mikrobiologiske belastning i såret på naturlig vis. Mikroorganismene bindes irreversibelt til bandagens overflade og fjernes, når bandagen skiftes.