

# Otinova<sup>®</sup> ørespray

## Emballage og holdbarhed

En 20 ml flaske indeholder 15 ml opløsning (150 pumpninger).

Holdbarhed ved stuetemperatur: 3 år fra fremstillingsdato (se dato på emballage og flaske), åbnet flaske 6 måneder.

**GTIN-13:** 7 30000902 863 4

**Distribueres** af Tjellesen Max Jenne og Nomeco

## Referencer

Udleveres efter henvendelse til ABIGO Pharma A/S eller Amellova AB.

[www.otinova.dk](http://www.otinova.dk)

## Indikation

Behandling og forebyggelse af betændelse i øregangen (ekstern otit, svømmerøre).

## Produktbeskrivelse

Otinova ørespray er et gennemprøvet og videnskabeligt /klinisk dokumenteret egenomsorgsprodukt, der effektivt forebygger og behandler betændelse i øregangen.

Otinova er registreret som et medicinteknisk produkt, klasse 1, for indikationen behandling og forebyggelse af betændelse i øregangen (MDD 93/42/EEC).

Otinova sælges receptfrit på apotek.

## Indhold og virkningsmekanisme

Otinova indeholder aluminiumacetat og aluminiumacetotartrat (1,8 % aluminium), eddikesyre, vand, pH 3–4 (Burows opløsning). Otinova indeholder ikke antibiotika eller steroider.

Otinova virker lokalt udtørrende, er kløestillende og har en bakterie- og svampedræbende effekt.

## Dosering og anvendelse

Otinova sprayes 1-2 gange i hvert øre, i øregangen, morgen og aften. Det er vigtigt at lægge hovedet på skrå efter applikation, så væsken kommer så langt som muligt ind i øregangen.

Kortvarig brug i maksimum 7 dage.

Otinova ørespray kan både anvendes af voksne og børn (>5 år).

Læs indlægssedlen i pakningen før brug.



### ABIGO Medical A/S

Stengårdsvej 25, 4340 TØLLØSE, DANMARK  
Tel +45 4649 8676  
info@abigo.dk www.abigo.dk

### AMELLOVA AB

Ett företag inom Abigo Gruppen