


SORBACT® FOAM DRESSING

Infeksjonsforebyggende skumbandasje

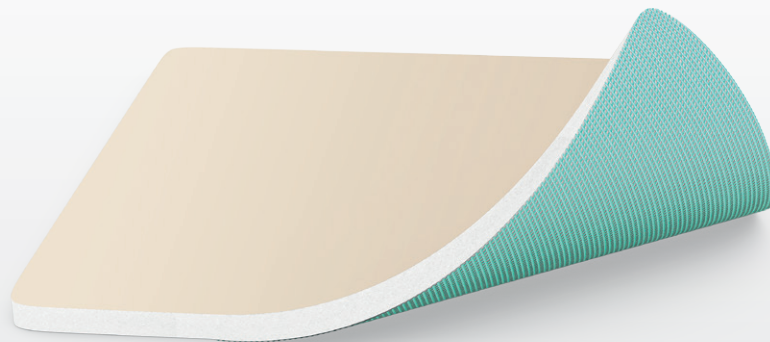

REDUSERER DEN MIKROBIELLE BELASTNINGEN I MODERAT VÆSKENDE SÅR

Sorbact® Foam Dressing er en steril bakterie- og soppbindende skumbandasje. Den består av en grønn Sorbact® sårkontaktflate kombinert med polyuretanskum med en semi-permeabel (pustende) bakside. Sorbact® Foam Dressing absorberer og holder på sårsekresjon, og reduserer dermed risikoen for maserasjon samtidig som bandasjen gir et fuktig sårmiljø. Den semi-permeable (pustende) baksiden slipper ut overflødig fuktighet fra såret.

Produkt	Ref.nr.	Str.	stk./pakning
Sorbact® Foam Dressing	98310	10x10 cm	10
Sorbact® Foam Dressing	98315	15x15 cm	10
Sorbact® Foam Dressing	98320	10x20 cm	10




INDIKASJONER

Sorbact® Foam Dressing er beregnet til behandling av rene, koloniserte, kontaminerte eller infiserte sår med lite til moderat sekresjon, for eksempel operasjonssår, traumesår, trykksår, diabetiske sår og sår på føtter og ben.

BRUKSANVISNING

1. Klargjør såret i samsvar med lokal klinisk praksis.
2. Velg en passende bandasjestørrelse for såret. Sårputen skal overlappe sårkantene med minst 2 cm.
3. Fjern bandasjen fra forpakningen ved bruk av aseptisk teknikk.
4. Bruk aseptisk teknikk dersom det skal klippes i bandasjen. Kast eventuell åpnet og ubrukt bandasje.
5. Sett på bandasjen. Det er viktig at den grønne siden av bandasjen kommer i direkte kontakt med hele såroverflaten.
6. Bruk passende fikseringsbandasje.
7. Hvor ofte bandasjen skal skiftes, avhenger av væsknivået, sårets generelle tilstand og den omkringliggende huden. Dersom den kliniske tilstanden tillater det, kan bandasjen bli sittende i opptil 7 dager.

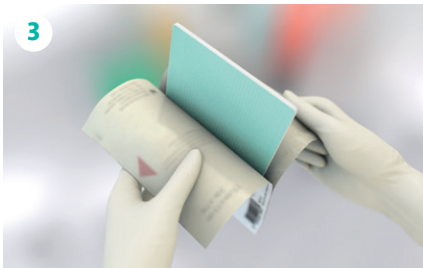

SORBACT® – FOREBYGGER INFEKSJON

Sorbact® bakterie bindende bandasje forebygger og behandler sårinfeksjoner ved å redusere den mikrobielle belastningen på naturlig måte. Mikroorganismene bindes irreversibelt til bandasjens overflate og fjernes når bandasjen skiftes.