


SORBACT® GEL DRESSING

Infeksjonsforebyggende sårkontaktlag med hydrogel

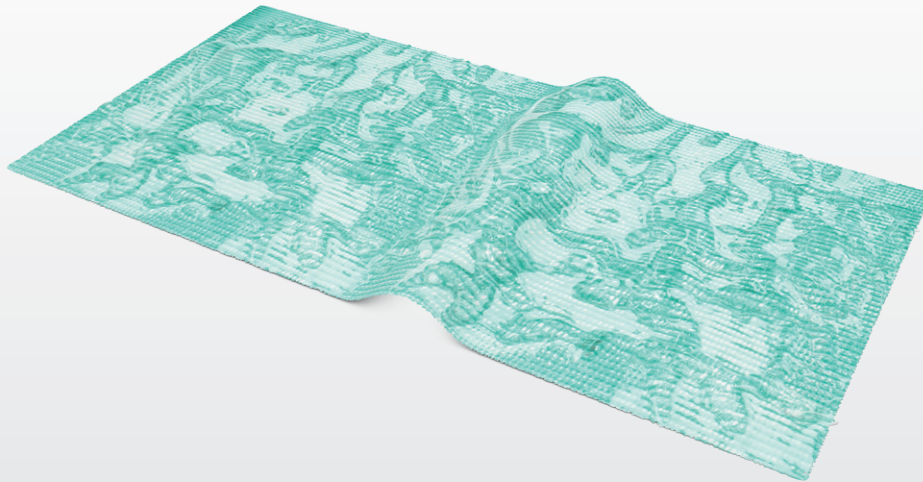

REDUSERER DEN MIKROBIELLE BELASTNINGEN I TØRRE TIL LETT VÆSKENDE SÅR

Sorbact® Gel Dressing er en steril bakterie- og soppbindende bandasje dekket med gel. Den består av en grønn Sorbact® sårkontaktflate med en vannbasert gel som inneholder carbomer og propylenglykol. Sorbact® Gel Dressing tilfører fuktighet, og gir et fuktig sårmiljø.

Produkt	Ref.nr.	Str.	stk./pakning
Sorbact® Gel Dressing	98136	7,5x7,5 cm	10
Sorbact® Gel Dressing	98137	7,5x15 cm	10
Sorbact® Gel Dressing	98139	3x15 cm	10



INDIKASJONER

Sorbact® Gel Dressing er beregnet til behandling av rene, koloniserte, kontaminerte eller infiserte sår som væsker lite eller ingenting, for eksempel traumesår, brannsår, sårlommer, fistler, trykksår, diabetiske sår og sår på føtter og bein.

BRUKSANVISNING

1. Klargjør såret i samsvar med lokal klinisk praksis.
2. Velg en passende bandasjestørrelse for såret.
3. Fjern bandasjen fra forpakningen ved bruk av aseptisk teknikk.
4. Bruk aseptisk teknikk dersom det skal klippes i bandasjen. Kast eventuell åpnet og ubrukt bandasje.
5. Sett på bandasjen. Det er viktig at bandasjen kommer i direkte kontakt med hele såroverflaten. Bandasjen må ikke overlape den omkringliggende huden.
6. I sårlommer og fistler skal alltid en del av bandasjen stikke ut, slik at den enkelt kan fjernes.
7. Legg på en egnet sekundærbandasje.
8. Hvor ofte bandasjen skal skiftes, avhenger av væskenivået, sårets generelle tilstand og den omkringliggende huden. Dersom den kliniske tilstanden tillater det, kan bandasjen bli sittende i opptil 7 dager.



SORBACT® – FOREBYGGER INFEKSJON

Sorbact® bakterie bindende bandasje forebygger og behandler sårinfeksjoner ved å redusere den mikrobielle belastningen på naturlig måte. Mikroorganismene bindes irreversibelt til bandasjens overflate og fjernes når bandasjen skiftes.