


# SORBACT® SURGICAL DRESSING

Infeksjonsforebyggende bandasje med kleber

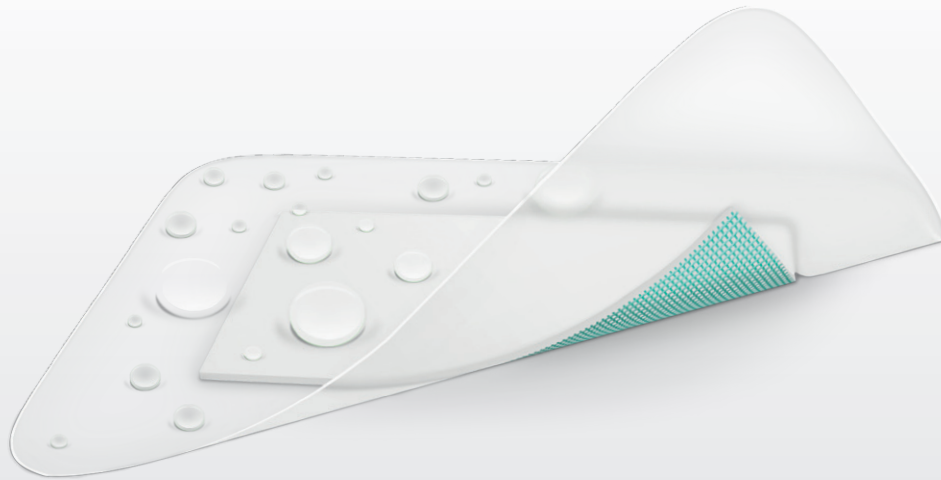

## REDUSERER SIGNIFIKANT RISIKOEN FOR POSTOPERATIVE SÅRINFEKSJONER<sup>1</sup>


*Sorbact® Surgical Dressing er en steril bakterie- og soppbindende sårbandasje. Den består av en grønn Sorbact®-kontaktflate kombinert med en absorberende sårpute og en transparent, selvklebende akrylfolie. Sorbact® Surgical Dressing absorberer og holder på sårveske. Den vanntette og pustende baksidefolien beskytter mot kontaminasjon utenfra og slipper ut overskuddsvæske.*

Produkt	Ref.nr.	Str.	Str. sårdyne	stk./pakning
Sorbact® Surgical Dressing	98140	5x7,2 cm	2,8x3,8 cm	100
Sorbact® Surgical Dressing	98141	8x10 cm	4x5 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98142	8x15 cm	3,8x10 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98143	10x20 cm	5x15 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98144	10x25 cm	5x20 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98145	10x30 cm	5x25 cm	20
Sorbact® Surgical Dressing	98146	10x35 cm	5x30 cm	20




## INDIKASJONER

Sorbact® Surgical Dressing er beregnet til behandling av rene, koloniserte, kontaminerte eller infiserte sår med lite sekresjon, som operasjonssår og traumesår, f.eks. flenger, kutt og skrubbsår.

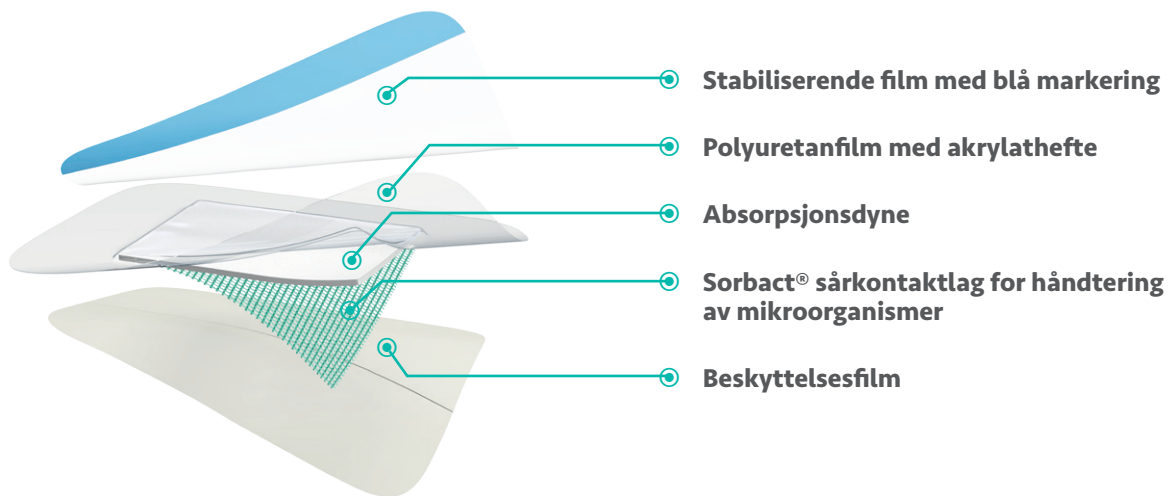

## BRUKSANVISNING

1. Klargjør såret i samsvar med lokal klinisk praksis. Kontroller at den omkringliggende huden er ren og tørr.
2. Velg en passende bandasjestørrelse for såret.
3. Fjern bandasjen fra forpakningen ved bruk av aseptisk teknikk.
4. Fjern beskyttelsesfolien fra bandasjens sårkontaktflate.
5. Sett på bandasjen. Kontroller at den grønne sårkontaktflaten kommer i direkte kontakt med hele såroverflaten.
6. Press kantene mot den omkringliggende huden.
7. Fjern den ytterste stabiliseringsfilmen. Start ved den blå markøren.

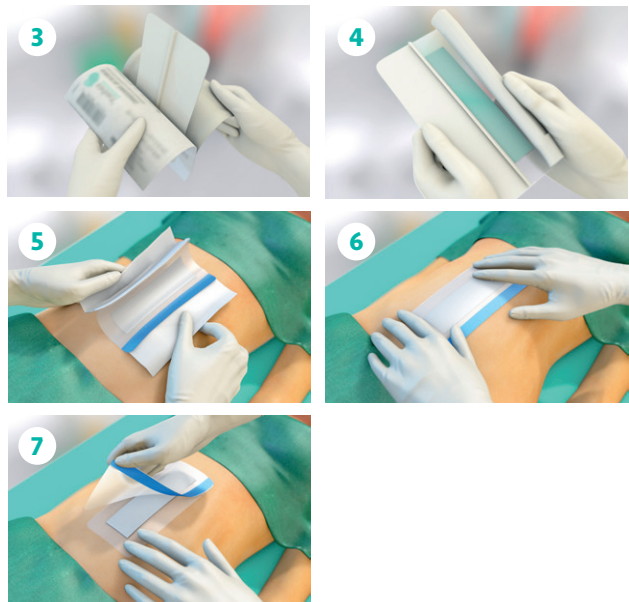

Dersom den kliniske tilstanden tillater det, kan bandasjen bli sittende i opptil 7 dager.

Referans: 1. Staninowski PJ, Bizon M, et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride (DACC) Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. *Hosp Infect* 2016; [in press].



## SORBACT® – FOREBYGGER INFEKSJON

Sorbact® bakterie bindende bandasje forebygger og behandler sårinfeksjoner ved å redusere den mikrobielle belastningen på naturlig måte. Mikroorganismene bindes irreversibelt til bandasjens overflate og fjernes når bandasjen skiftes.